


## Choisir un tire-lait

### Les mères tirent leur lait pour de nombreuses raisons.

Le tirage fournit du lait pour les tétées lorsque vous êtes absente. Il augmente la production de lait si votre bébé ne se nourrit pas bien ou ne se nourrit pas encore au sein. Lorsque vous choisissez un tire-lait, sachez que certains sont plus adaptés que d'autres à certaines situations.

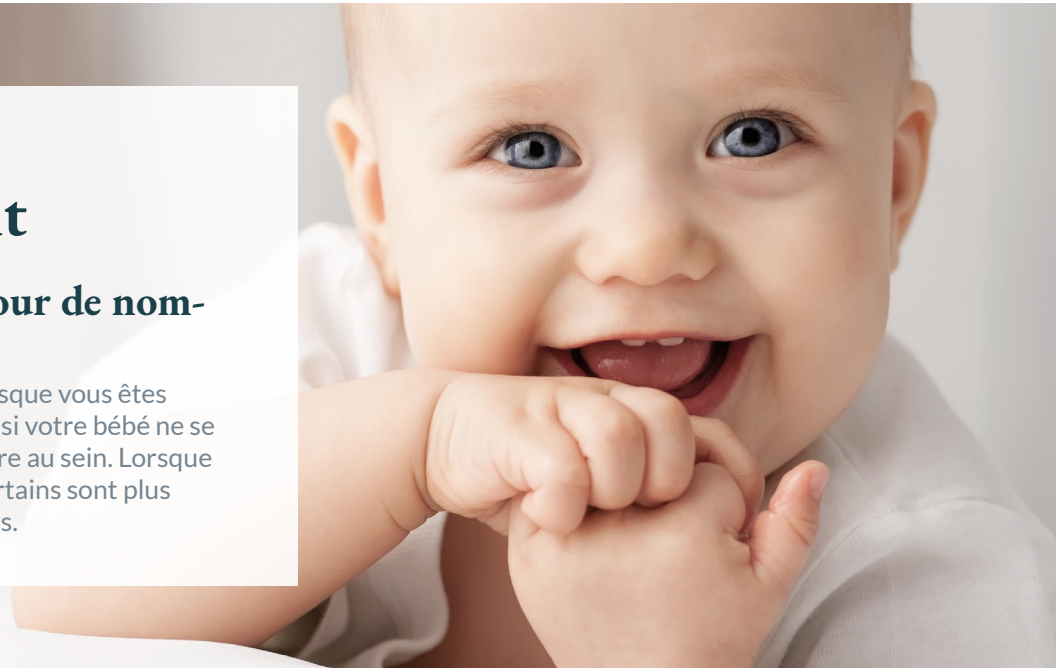

### Ai-je besoin d'un tire-lait?

Tout le monde n'a pas besoin d'un tire-lait, mais toutes les nouvelles mamans vous diront qu'un bon tire-lait est essentiel pour construire ou maintenir votre production de lait si :

- vous devez être séparée de votre bébé pour une raison quelconque
- Votre bébé a du mal à prendre le sein
- Vous avez des problèmes de production de lait
- Votre bébé est trop prématuré ou trop malade pour être allaité.

### De quel type de tire-lait ai-je besoin?

Choisissez un tire-lait adapté à votre situation en fonction du tableau ci-dessous :

### Y a-t-il quelque chose de particulier à rechercher dans un kit de pompe?

Oui. Vous voudrez acheter un tire-lait dont le kit de pompe contient :

- Une barrière pour protéger votre lait contre les bactéries, les virus et les moisissures qui peuvent se développer dans les tubes humides et les tire-laits.
- Plusieurs brides de tailles différentes afin que vous puissiez obtenir la bonne taille de bride pour un meilleur confort et un meilleur écoulement du lait.
- L'option de tirage double ou simple
- Un kit qui peut être utilisé sur tous les tire-laits électriques du même fabricant.

Situation	Pompe multi-utilisateurs/de qualité hospitalière/de location	Pompe personnelle mono-utilisateur	Pompe manuelle
La montée de lait est établie, l'allaitement est bon et le tirage est occasionnel (par ex : lors des sorties).	✓	✓	✓
La montée de lait est établie, l'allaitement est bon et le tirage se fait quotidiennement (par ex : aller au travail/à l'école).	✓	✓	
La montée de lait est établie, l'allaitement est régulier et le bébé n'est pas allaité (prématuré, problèmes de prise du sein, problèmes de montée de lait, etc.)	✓		
La montée de lait est établie, le bébé n'est pas allaité (prématuré, problèmes de prise du sein, problèmes de montée de lait, etc.)	✓		

## Quelles sont les caractéristiques que je dois rechercher dans un tire-lait multi-utilisateurs de qualité hospitalière?

En plus d'un kit de pompe avec une barrière éprouvée et plusieurs tailles de brides, recherchez les caractéristiques supplémentaires suivantes :

- Des cadrans d'aspiration et de vitesse séparés pour vous aider à...
  - Personnaliser votre séance de tirage pour une expérience multiphase
  - Suivre votre flux de lait en réglant la vitesse pour déclencher plus rapidement plusieurs éjections de lait (descente) tout en maintenant l'aspiration à votre niveau le plus confortable.
- Pouvoir régler la vitesse et l'aspiration par petits incréments pour plus de confort et un meilleur écoulement du lait.
- Des recherches ont été menées pour confirmer les allégations d'aide à l'établissement d'une production de lait adéquate pour les mères d'enfants prématurés.



TIRE-LAIT AMEDA PLATINUM™



TIRE-LAIT AMEDA ELITE™

## Quelles sont les caractéristiques que je dois rechercher dans un tire-lait personnel à mono-utilisateur?

En plus d'un kit de pompe avec une barrière éprouvée et plusieurs tailles de brides, recherchez les caractéristiques supplémentaires suivantes :

- Des cadrans d'aspiration et de vitesse séparés pour vous aider à...
  - Personnaliser votre séance de tirage pour une expérience multiphase
  - Suivre votre flux de lait en réglant la vitesse pour déclencher plus rapidement plusieurs éjections de lait (descente) tout en maintenant l'aspiration à votre niveau le plus confortable.
- Option batterie ou adaptateur voiture
- Garantie d'au moins un an



TIRE-LAIT MYA JOY



TIRE-LAIT MYA

## Quelles sont les caractéristiques que je dois rechercher dans un tire-lait manuel?

Recherchez ces caractéristiques :

- Une poignée confortable qui pivote pour un meilleur confort du poignet.
- La possibilité de presser et de maintenir le lait pendant qu'il coule pour réduire le travail de tirage manuel.



TIRE-LAIT À UNE MAIN AVEC FOURRE-TOUT



TIRE-LAIT MANUEL À UNE MAIN

Il s'agit de renseignements généraux qui ne remplacent pas les conseils de votre fournisseur de soins de santé. Si vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre rapidement, demandez de l'aide sans tarder. Chaque bébé est différent. En cas de doute, communiquez avec votre médecin ou un autre professionnel de la santé.